



ATENÇÃO!

Tenha em mãos um relógio ou cronômetro e leia as **INSTRUÇÕES DE USO** do produto. Além disso, você pode assistir ao vídeo explicativo através do site www.khayrosdiagnostica.com.br ou através do QR Code acima.

Lave bem as mãos antes de abrir o teste.

Não abra nenhuma embalagem do kit antes de ler as instruções de uso.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Mantenha a embalagem selada em ambiente seco e fresco (2-30°C). **NÃO CONGELE.**



CONTEÚDO DO KIT

- A Sachê contendo dispositivo teste
- B Solução extratora
- C Swab estéril
- D Descarte plástico
- E Instruções de uso

COLETA DE AMOSTRA NASAL

PASSO 1

Lave bem as mãos antes de abrir o teste. Agite gentilmente o tubo com a Solução Extratora e assegure que o líquido fique no fundo do frasco. Remova a tampa do tubo.



PASSO 2

Coloque-o na posição vertical na região do picote indicada na embalagem do produto.



PASSO 3

Abra o swab e insira-o na narina (cerca de 2 centímetros).



PASSO 4

Gire-o de 5 a 10 vezes contra a parede nasal. Usando o mesmo swab, repita o procedimento de coleta na outra narina.



PASSO 5

Coloque o swab no tubo contendo a solução extratora, de modo que a ponta de fibra fique mergulhada no líquido. Gire o swab por 1 minuto enquanto aperta o tubo com as mãos pressionando a ponta do swab para extrair o vírus.



PASSO 6

Retire o swab apertando as paredes do tubo contra a ponta de fibra do swab, de modo que todo o líquido seja removido e permaneça dentro do tubo. Coloque o swab dentro do descarte plástico fornecido no kit.



PASSO 7

Encaixe a tampa conta-gotas no tubo, empurrando-a para baixo.



PASSO 8

Abra o sachê com o dispositivo teste e coloque-o em uma superfície plana e limpa.



PASSO 9

Adicione 4 gotas da amostra extraída, com o tubo na posição vertical, no poço de amostra do dispositivo.




PASSO 10

Aguarde 15 a 30 minutos para ler o resultado. Não interprete após 30 minutos.



PASSO 11

Coloque os produtos usados no descarte plástico fornecido no kit e feche-o apertando o zip. Jogue o descarte plástico em lixo comum.

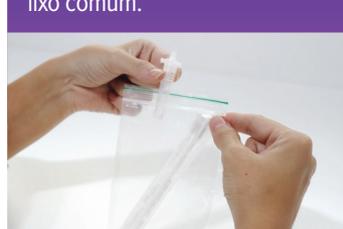

PASSO 12

Limpe o local onde realizou o teste com álcool 70%. Lave as mãos novamente.



INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

POSITIVO



Aparecimento de duas linhas coloridas, uma linha colorida deve estar na região controle (C) e outra linha colorida deve estar na região teste (T). O resultado positivo indica a presença do vírus SARS-CoV-2 na amostra. A intensidade da cor na região teste (T) pode variar. Portanto, qualquer tonalidade de cor visualizada na linha teste deve ser considerada positiva.


Coloque seu teste aqui!

NEGATIVO



Aparecimento de somente uma linha colorida na região controle (C).

INVÁLIDO

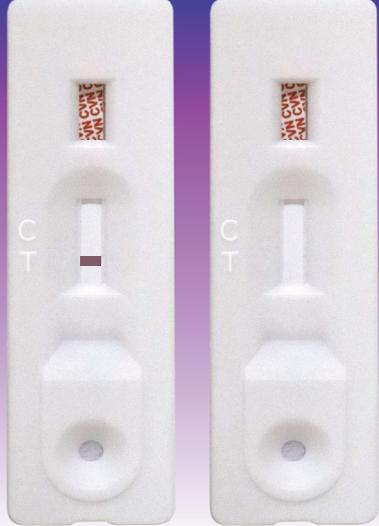

Ausência de linha colorida na região controle (C). As razões mais prováveis para falha da linha controle são o volume de amostra insuficiente ou uma falha no procedimento. Reveja o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo. Se o problema persistir, pare de usar o kit e entre em contato com a Khayrós Diagnóstica.

Guia de intensidade de cor



O QUE FAZER QUANDO O RESULTADO FOR POSITIVO?

- Independente dos sintomas, procure uma unidade de atendimento de saúde (ou teleatendimento) para que um profissional da saúde, mediante as estratégias já postas pelo Ministério da Saúde, realize a confirmação do diagnóstico, notificação e orientações pertinentes de vigilância e assistência em saúde quanto aos próximos passos a tomar.
- Siga os protocolos de segurança como higienização das mãos, uso de máscara e isolamento pelo tempo indicado pelo Ministério da Saúde.
- Avise as pessoas com quem você teve contato para se testarem.
- Não viaje durante o seu período de isolamento.

POR QUANTO TEMPO DEVO FAZER O ISOLAMENTO, CASO TENHA UM RESULTADO POSITIVO NO TESTE DE COVID-19?

As orientações quanto ao tempo de isolamento são definidas pelo Ministério da Saúde e variam de acordo com a situação e devem ser avaliadas em conjunto com um profissional de saúde.

O QUE FAZER QUANDO O RESULTADO FOR NEGATIVO?

- O resultado negativo indica que não foi detectado o vírus da Covid-19.
- Pode existir uma infecção mesmo se o teste der negativo, pois a testagem pode ter sido feita durante o período de incubação, ter

havido erro na execução do ensaio ou na coleta da amostra ou mesmo a carga viral estar abaixo da capacidade de detecção do teste no dia da coleta da amostra.

- Em caso de suspeita, repita o teste após 1 a 2 dias.
- Manter todos os protocolos de segurança como higiene das mãos, uso de máscara e distanciamento.
- Se você apresenta sintomas como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, perdas olfativas/gustativas (não sente cheiro e nem gosto) e dores no corpo é importante realizar outro teste ou procurar atendimento em um serviço de saúde para avaliação. Se permanecer a suspeita, a realização de teste de RT-PCR é recomendada.

O QUE FAZER QUANDO O RESULTADO FOR INVÁLIDO?

- O resultado inválido não tem valor, isto é, não pode ser considerado.
- A causa mais provável é a execução errada do teste.
- Descarte o produto e repita o teste com um novo dispositivo.

DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO TESTE?

Em caso de dúvidas ou dificuldades em relação ao autoteste, entre em contato com o número gratuito de suporte da Khayrós Diagnóstica pelo 0800-0001079 ou ligue para o DISQUE SAÚDE (canal do Ministério da Saúde) pelo telefone 136.